

## 寒冷地・冬季利用の注意

※重要事項

当機 SMDP03 は精密な電子機器です 温度の低い場所・環境では、正しい測温ができません

- 1) 設置場所の温度を確認してください

推奨動作環境:15℃～35℃ 設置環境に 30 分以上経過してから使用して下さい

- 2) 寒い朝・温度の低い消毒液を注入した場合等、SMDP03 機内の温度が低い状態では正しく測温できません 安定した動作環境を保持できるまでお待ちください

- 3) 寒い戸外で冷たくなっている手の状態では、正しく測温できません

株式会社エクセルシステム